

Nadelwechsel

Ein Nadelwechsel muss unmittelbar vor jeder Injektion erfolgen.
Bitte führen Sie vor jeder Insulininjektion einen Sicherheitstest durch.

Probleme, die durch mehrmaligen Gebrauch von Nadeln entstehen können:


- Widerhakenbildung, Abnutzung der Silikon-Gleitschicht (= höheres Schmerzempfinden)
- Veränderung des Unterhautfettgewebes (Bildung von Lipodystrophien).
Dadurch mögliche Veränderung der Insulinaufnahmedauer.
- Luftblasenbildung in der Patrone wird durch Abnehmen der Nadel nach der Injektion vermieden.
- Infektionsgefahr durch mehrmaligen Gebrauch von nicht sterilen Nadeln

Nadeleigenschaften

- Sehr dünn
- Fein geschliffen
- Mit Gleitfilm überzogen
- Nach jedem Einstich verändert sich der Gleitfilm

Folgen mehrmaliger Anwendung

- Abstumpfung
- Widerhakenbildung
- Verletzungen und Verhärtungen im Fettgewebe

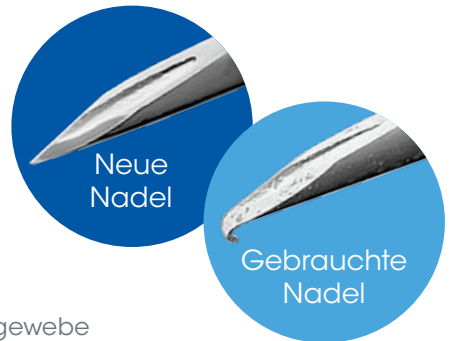

Vielseitige Beratung

Haben Sie Fragen zu Diabetes? Wir haben Antworten, die in Ihr Leben passen:
Insuline, Pens und intelligente Blutzuckermessgeräte.

Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da. Rund um die Uhr.

Ihr ServiceCenter Diabetes

0800 52 52 010

(gebührenfrei aus dem
dt. Fest- und Mobilfunknetz)

servicecenter-diabetes@sanofi.com

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

ServiceCenter Diabetes
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main

www.diabetologieportal.de

Ein Service von

SANOFI DIABETES &
CARDIOVASCULAR



