

# Nadelwechsel

Ein Nadelwechsel muss unmittelbar vor jeder Injektion erfolgen.  
Bitte führen Sie vor jeder Insulininjektion einen Sicherheitstest durch.

## Probleme, die durch mehrmaligen Gebrauch von Nadeln entstehen können:


- Widerhakenbildung, Abnutzung der Silikon-Gleitschicht (= höheres Schmerzempfinden)
- Veränderung des Unterhautfettgewebes (Bildung von Lipodystrophien).  
Dadurch mögliche Veränderung der Insulinaufnahmedauer.
- Luftblasenbildung in der Patrone wird durch Abnehmen der Nadel nach der Injektion vermieden.
- Infektionsgefahr durch mehrmaligen Gebrauch von nicht sterilen Nadeln

## Nadeleigenschaften

- Sehr dünn
- Fein geschliffen
- Mit Gleitfilm überzogen
- Nach jedem Einstich verändert sich der Gleitfilm

## Folgen mehrmaliger Anwendung

- Abstumpfung
- Widerhakenbildung
- Verletzungen und Verhärtungen im Fettgewebe

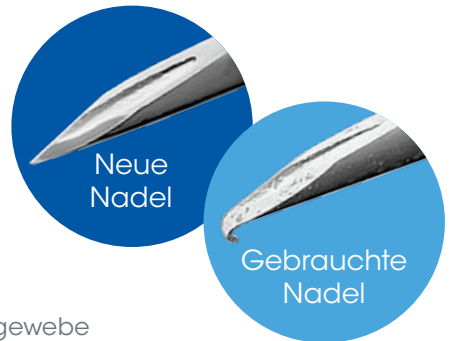

## Vielseitige Beratung

Haben Sie Fragen zu Diabetes? Wir haben Antworten, die in Ihr Leben passen:  
Insuline, Pens und intelligente Blutzuckermessgeräte.

Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da. Rund um die Uhr.

Ihr ServiceCenter Diabetes

**0800 52 52 010**

(gebührenfrei aus dem  
dt. Fest- und Mobilfunknetz)

[servicecenter-diabetes@sanofi.com](mailto:servicecenter-diabetes@sanofi.com)

**Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**

ServiceCenter Diabetes  
Industriepark Höchst  
65926 Frankfurt am Main

[www.diabetologieportal.de](http://www.diabetologieportal.de)

Ein Service von

**SANOFI** DIABETES &  
CARDIOVASCULAR



