



Sofra-Tüll® classics

Verbandtülle imprägniert

SANOFI 

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sofra-Tüll® classics

Sofra-Tüll classics ist eine angefeuchtete, feinmaschige Verbandtülle aus 100 % Polyester, imprägniert mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion „HPP“ (Hydrative Protective Polymers).

Zusammensetzung der Imprägnierung: Propylenglykol, Glycerin, Aqua purificata, medizinischer Honig.

Inhalt

Sofra-Tüll classics ist erhältlich in Packungen mit 10 und 50 Abschnitten (à 10 cm x 10 cm) bzw. in Packungen mit 10 Streifen (à 30 cm x 10 cm). Jeder Abschnitt bzw. Streifen (gefaltet) ist einzeln steril verpackt.

Anwendungsgebiete

Wozu wird Sofra-Tüll classics angewendet?

Sofra-Tüll classics wird angewendet zur Wundversorgung nach operativen Eingriffen sowie bei oberflächigen (reizlosen) Verletzungen der Haut.

Die imprägnierte Verbandtülle verhindert das Verkleben flächiger Wunden mit dem Verband. Durch die feinmaschige hydrophobe Verbandtülle kann Sekret gut abfließen, ohne sich zu stauen und den Wundrand aufzuweichen. Verbandwechsel erfolgen weitgehend schmerzfrei und ohne Irritation von Wundrand und Wundgrund.

Gegenanzeigen

Wann darf Sofra-Tüll classics nicht angewendet werden?

Sofra-Tüll classics darf nicht angewendet werden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile,
- infizierten, tiefen, chronischen, fibrinbelegten oder nässenden Wunden.

Anwendung

Wie wird Sofra-Tüll classics angewendet?

Das Sachet wird an der mit Pfeilen gekennzeichneten Stelle geöffnet und der Abschnitt bzw. Streifen mit einer Pinzet-

te entnommen. Der Aufdruck auf dem Sachet kennzeichnet die Wundseite der Tülle. Sofra-Tüll classics kann auf die Wundgröße zugeschnitten werden und direkt auf die gereinigte Wunde aufgebracht werden. Danach wird Sofra-Tüll classics mit einem sterilen Verband abgedeckt und fixiert.

Hinweis:

Anwendungsdauer bis 30 Tage. Die Seite der Tülle, die zur bedruckten Seite der Einzelverpackung zeigt, wird auf die Wunde gelegt. Packungen mit beschädigter Einzelversiegelung dürfen nicht verwendet werden.

Nebenwirkungen

Sofra-Tüll classics ist frei von Wirkstoffzusätzen und gut verträglich.

Haltbarkeit/Aufbewahrungshinweise

Das Verfalldatum dieses Medizinproduktes ist auf der Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt der Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information

Dezember 2018

Vertrieb:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main



Biocell Gesellschaft für Biotechnologie mbH
Hauptstraße 60
53804 Much / Germany

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 / DIN ISO 13485



0481



STERILE R



1060024438
12.2018